

Tasectan®

Anwendungsbereich

Tasectan® ist ein Medizinprodukt, das die physiologische Funktion der Darmwand wiederherstellt. Es wurde speziell entwickelt, um die Symptome unterschiedlicher Durchfallarten wie Druckgefühl im Bauch und häufiger Stuhlgang zu bekämpfen und zu mindern. Es wirkt innerhalb von 12 Stunden.

Das Gelatinetannat, aus dem sich das Medizinprodukt zusammensetzt, wird im Magen nicht verändert und wirkt, indem es eine Schicht bildet, die die Darmschleimhaut schützt und so die Häufigkeit und Dauer der Durchfälle reduziert.

Packungen

Zwanzig Beutel mit Pulver zur Anwendung bei Kindern.

Blisterpackung mit fünfzehn Kapseln zur Anwendung bei Erwachsenen.

Zusammensetzung

Pulver: 250 mg Gelatinetannat (porcinen Ursprungs).

Kapseln: 500 mg Gelatinetannat (porcinen Ursprungs), Maisstärke und Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs).

Anwendungshinweis

Pulver: Der Inhalt eines Beutels muss mit einer kleinen Menge Milch, Obstsaft oder Wasser vermischt und sofort eingenommen werden. Er kann auch mit Joghurt oder einem anderen Lebensmittel eingenommen werden. Das Medizinprodukt nicht direkt ohne Vermischen einnehmen.

Kapseln: Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Kinder unter 3 Jahren: 1 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Kinder zwischen 3 und 14 Jahren: 1 oder 2 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Erwachsene und Kinder über 14 Jahre: 1-2 Kapseln alle 4-6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Warnhinweise

- » Es ist nicht erforderlich, vor der Anwendung des Medizinprodukts eine medizinische Fachkraft zu konsultieren. Im Falle von heftigeren oder anhaltenden Symptomen oder wenn Zweifel bezüglich der Diagnose bestehen, sollte eine medizinische Fachkraft konsultiert werden.
- » Im Falle von Durchfall bei Kindern unter 3 Jahren und älteren Menschen sollte eine medizinische Fachkraft konsultiert werden, vor allem bei Vorhandensein von weiteren Symptomen.
- » Dieses Medizinprodukt ist kein Arzneimittel. Wenn eine derartige Behandlung von einer medizinischen Fachkraft empfohlen wird, kann das Medizinprodukt gleichzeitig dazu eingenommen werden.
- » Es wird empfohlen, reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen sowie die bei Durchfallerkrankungen üblichen diätetischen Maßnahmen anzuwenden.
- » Zwar sind keine Nebenwirkungen bekannt, doch sollte das Medizinprodukt nicht in Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden, außer wenn es von einer medizinischen Fachkraft verordnet wird.
- » Das Medizinprodukt nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- » Das Medizinprodukt nicht verwenden, wenn die Blisterpackung oder die Beutel geöffnet oder beschädigt sind.
- » Bei Raumtemperatur von Wärmequellen entfernt lagern. Nicht einfrieren.
- » Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Tasectan® darf nicht von Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Gelatinetannat oder einen der anderen Inhaltsstoffe des Medizinproduktes eingenommen werden.

Rev.02: 21.11.2016



NOVENTURE, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona - Spanien

CE 0373

Vertrieb: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstraße 96, 6067 Absam (Österreich)

05/17-106601